

クッションチェアクール

ユーザーの方へ

取扱説明書

ーヘッドレストー

大きさと形状をさらに改良しました。頭部をしっかり支えて横倒れを防止。単独での使用も快適です。

ーシートパッドー

専用のメッシュ素材シートパッドで不快なムレを軽減します。もちろん洗濯機で丸洗いができます。

ー三角マットー

三角マットを使い、起きる姿勢から安定した姿勢をつくり出します。

カバー

ヘッドレスト

シートパッド

補高用
クッション

三角マット



ーカバーー

色を2色用意しました。ファスナー位置の改良により本体カバーの取り外しが簡単になりました。

背面から扇風機などで送風すると、風が通り抜けるように断面構造を工夫した特注品です。



ー補高用クッションー

シートパッドの下に補高用クッションが標準装備されています。不要の方は取り外してご使用ください。

※専用ポケットは「α」のみ標準装備です。

■重力を利用する椅子

クッションチェアは、ベルトやパッド類で体を支える代りに、座面と背もたれをリクライニングさせ、椅子の両サイドが体を支えることにより姿勢を安定させる椅子です。

本体を傾けることにより体を保持する力が高まるようになっていますので、三角マットを使ったリクライニングが重要となります。

どんなに傾けても背もたれと座面は直角に保たれていますので、常におしりで体重を受けることになり、寝ているのではなく「座っている」姿勢をとることができます。

クッションチェアに座ると肘が少し前に押し出され、そのため肩は自然な位置に保持され、安定した座位が得られやすくなります。

■セカンドチェアとして

食事、遊び、学習などで姿勢を正して座る椅子を「ファーストチェア」とするならば、クッションチェアは、ゆっくりとくつろぐための「セカンドチェア」といえます。クッションチェアは、ファーストチェアとしての座位保持装置との併用をおすすめします。

使い分けることで生活にリズムを与えることができ、自然に体位交換もできるなど、いくつかの相乗効果が期待できます。

■リクライニングについて

クッションチェアの最も重要な座位保持要素です。三角マットを使い、頭と上体が安定するところまでリクライニングさせてください。

また、テレビを見たり休息を取るなど、目的に応じて角度を三角マットで調節してください。

⚠ ※緊張や反射運動のある方の場合、側方または後方への転倒の恐れがありますので十分注意してご使用ください。

⚠ ※側方への傾きが強い場合、三角マットを横から入れて対応できる場合もありますが、十分注意してご使用ください

■使用時間について

⚠ いくらリラックスできる姿勢といっても、同じ姿勢を30分以上続けると苦痛になります。長時間の使用はお避け下さい。自分で姿勢を変えることができない方の場合には特にご注意ください。

ご使用前に医療機関のアドバイスを受けることをおすすめします。

また、別の椅子にしばらく座ってもらうなど、日常生活の中で上手にリズムをつけてご使用ください。

⚠ 廃棄につきましては、最寄の行政担当窓口におたずねください。

※カバー類（シートパッド）が汚れた場合は中性洗剤で軽くふき取るか、もしくは水洗いをおこない日光の当たらない場所で乾燥させてください。（色落ちする場合があります。）タンブラー乾燥はおやめください。

保証書

- 保証期間はご購入後1ヶ年です。
- 保証期間中に「正常な使用状態」において「製造上の欠陥」による故障については無償修理をいたします。ただし、磨耗やシートの破れ等は除きます。
- 次の場合は保障期間中でも有償修理といたします。
 - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理改造による故障
 - (ロ) 天災地変などによる故障
 - (ハ) 保証書に販売店の押印のない場合
 - (ニ) 保証書を紛失された場合
 - (ホ) ご購入後、保証書にお客様名の記入がない場合または不当な変更を加えた場合

- 故障の場合は販売店へご連絡ください。
- この保証書は日本国内においてのみ有効です。 This guarantee is valid only with in Japan.

■発売元



ハンディを持つ人の食器・椅子建物・街づくりまで

株式会社 無限工房

〒854-0007 長崎県諫早市目代町705-16
TEL0957-22-6640 FAX0957-22-9092

| | | |
|-----------------|-----|-----|
| ご住所 〒 | TEL | 販売店 |
| お名前 | | 殿 |
| お買い上げ日 平成 年 月 日 | | |

サンプル

印